

BD Manager 360°


Download, Installation und Anmeldung

Kurzanleitung für den Schnelleinstieg


BD Manager 360°

Download - Installation - Anmeldung

Inhaltsverzeichnis	Seite
Download der Software-Module	3
Installation der Software-Module	5
Registrieren der Benutzerdaten	7
Erster Start des ^{BD}Manager 360°	11
Eingabe der Lizenzschlüssel zur Aktivierung der Module	13
Eingabe der Daten des Unternehmens	16
Aktivierung der pay-per-use Lizenzschlüssel	19
Einrichtung von Austauschpartnerschaften	20
Teilen von Projekten	21
Abruf von Projekten	23
Weitere Informationen	24

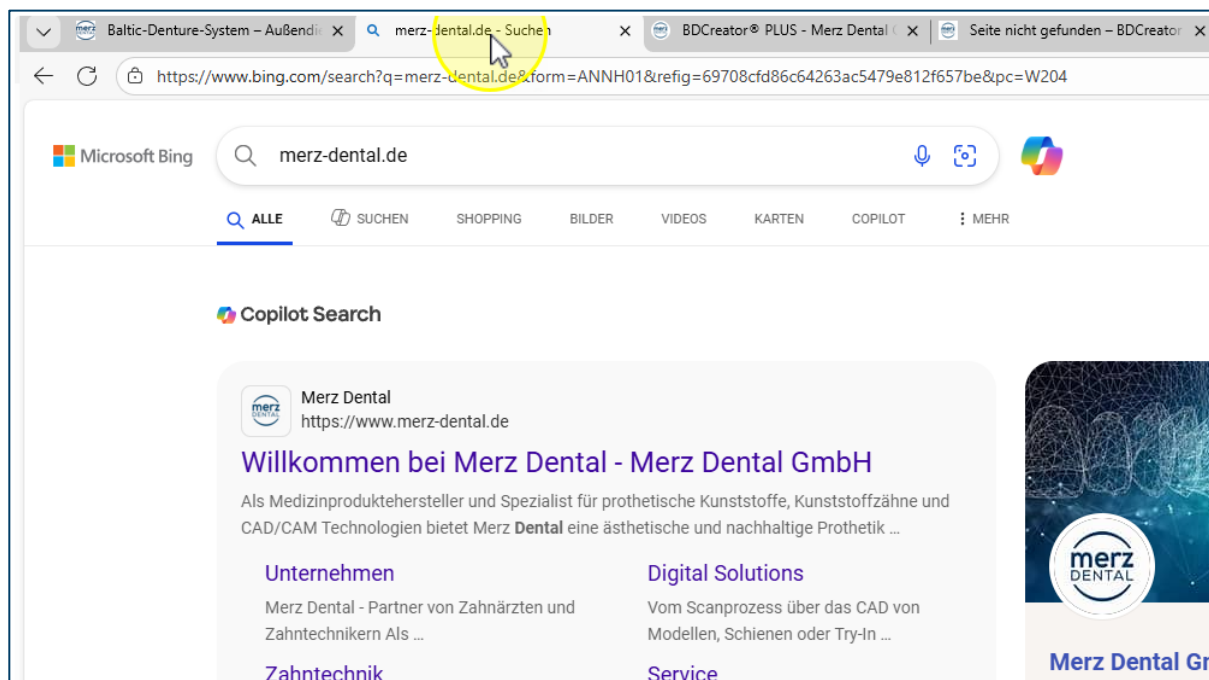

Gehen Sie zu: www.merz-dental.de

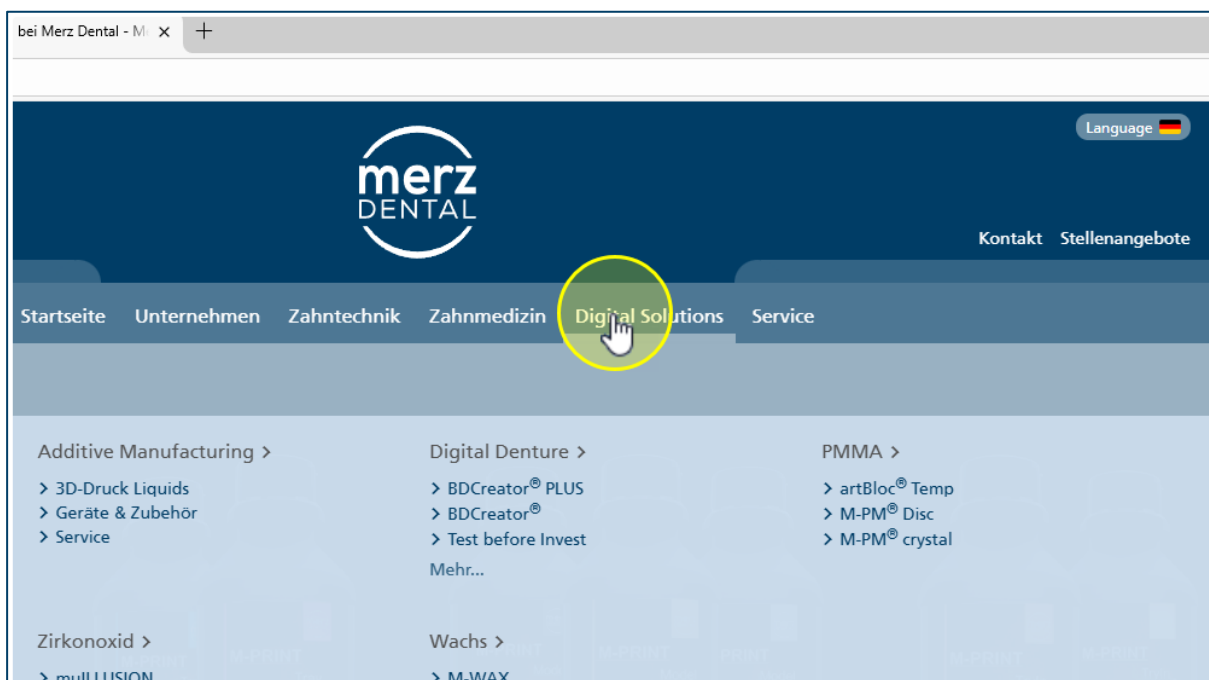


Wählen Sie „Digital Solutions“



Wählen Sie die Rubrik „Digital Denture“



Klicken Sie auf „Download ^{BD}Manager 360“

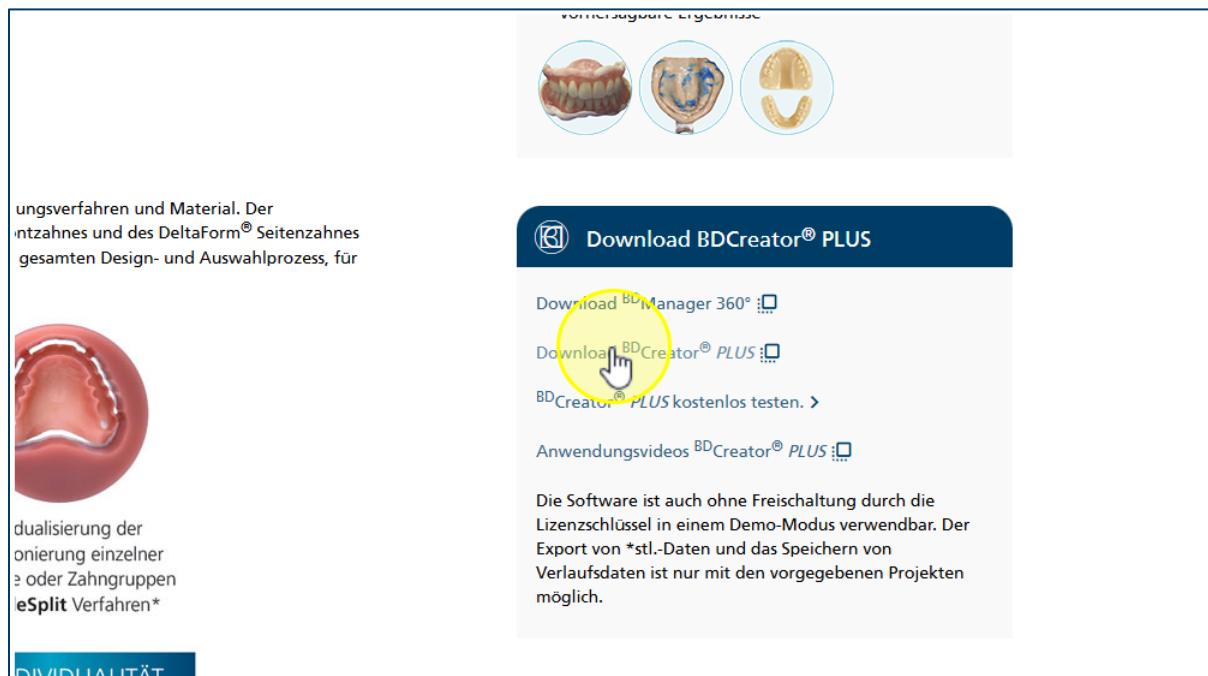

Vorherige Ergebnisse

ungsverfahren und Material. Der
ntzahn und des DeltaForm® Seitenzahn
gesamten Design- und Auswahlprozess, für


Download BDCreator® PLUS

Download BDCreator® PLUS 360°
Download BDCreator® PLUS
BDCreator® PLUS kostenlos testen. >
Anwendungsvideos BDCreator® PLUS

Die Software ist auch ohne Freischaltung durch die
Lizenzschlüssel in einem Demo-Modus verwendbar. Der
Export von *.stl-Daten und das Speichern von
Verlaufsdaten ist nur mit den vorgegebenen Projekten
möglich.

Individualität

Klicken Sie auf „Download BDCreator® PLUS“

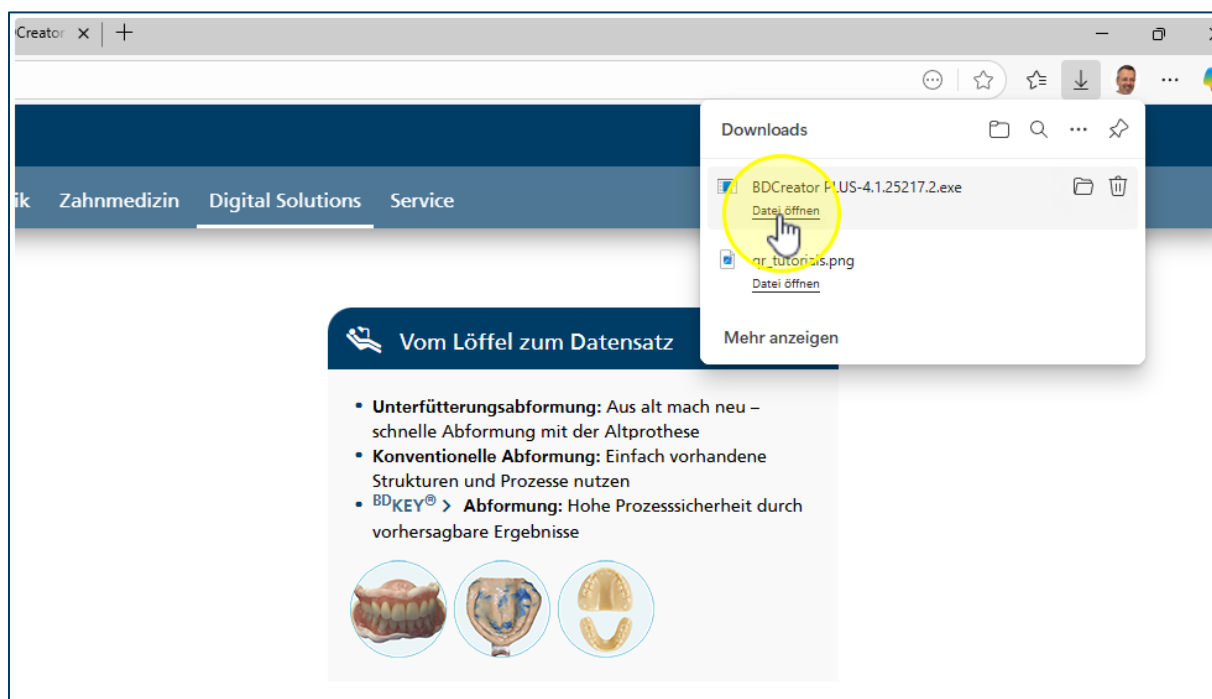

Creator x | +


Downloads

BDCreator PLUS-4.1.25217.2.exe
Datei öffnen
qr_tutorials.png
Datei öffnen
Mehr anzeigen


Vom Löffel zum Datensatz

- **Unterfütterungsabformung:** Aus alt mach neu – schnelle Abformung mit der Altprothese
- **Konventionelle Abformung:** Einfach vorhandene Strukturen und Prozesse nutzen
- **BDKEY® > Abformung:** Hohe Prozesssicherheit durch vorhersagbare Ergebnisse


Öffnen Sie die entsprechenden Installationsdateien über den Explorer unter „Downloads“

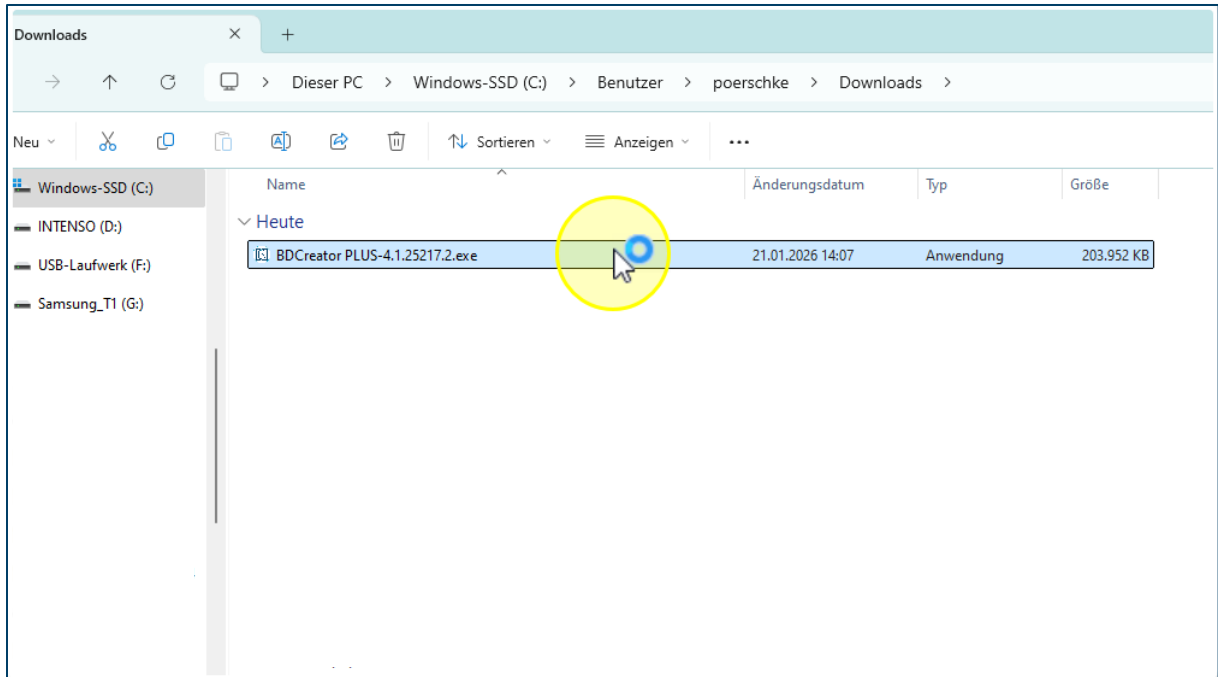


Installieren Sie beide Software-Pakete

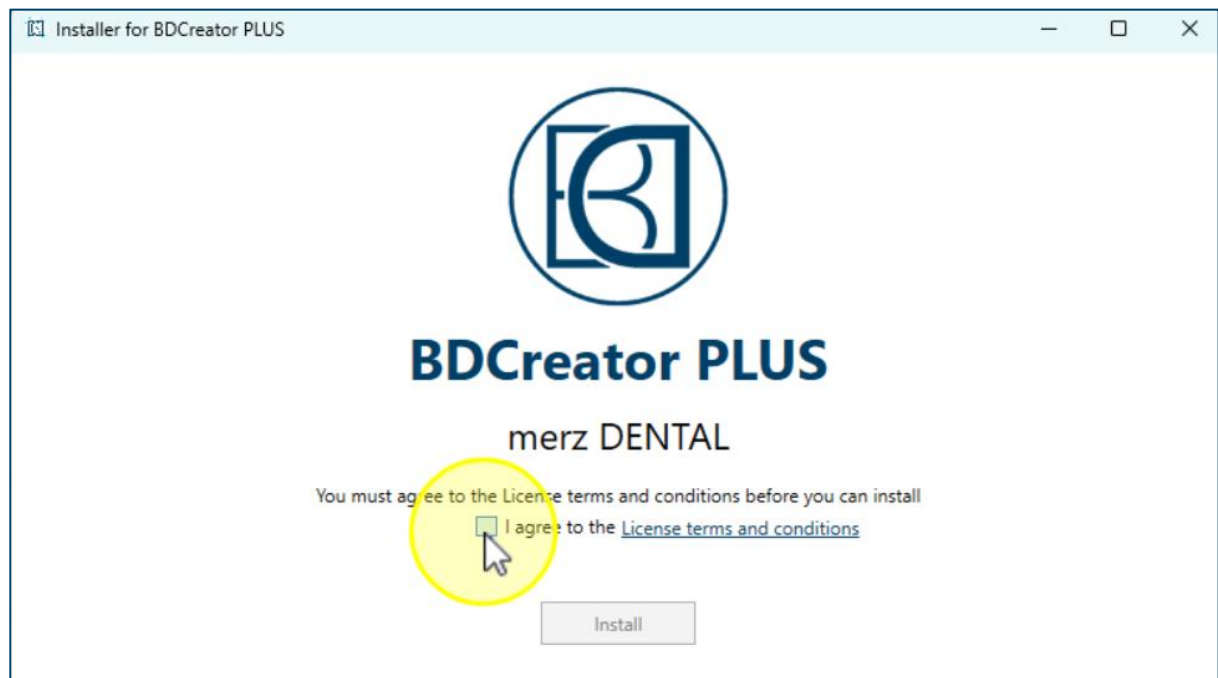

Befolgen Sie dabei die Anweisungen in der Anzeige

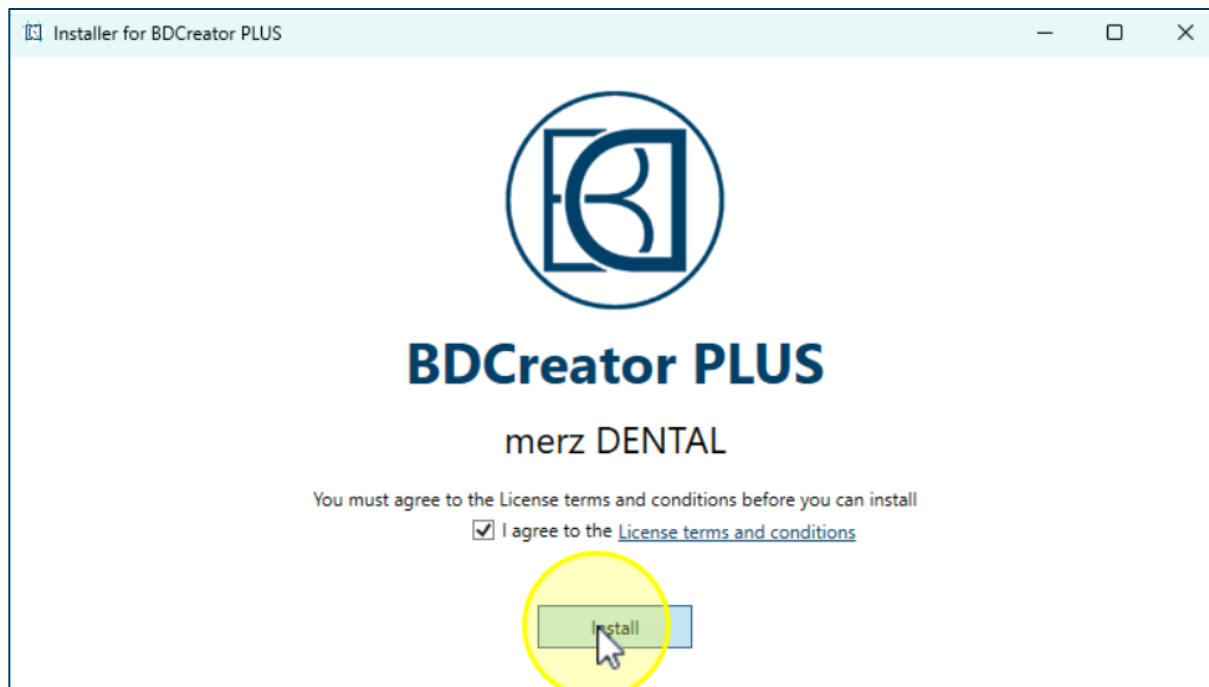

Bestätigen Sie die EULA und starten Sie die Installation

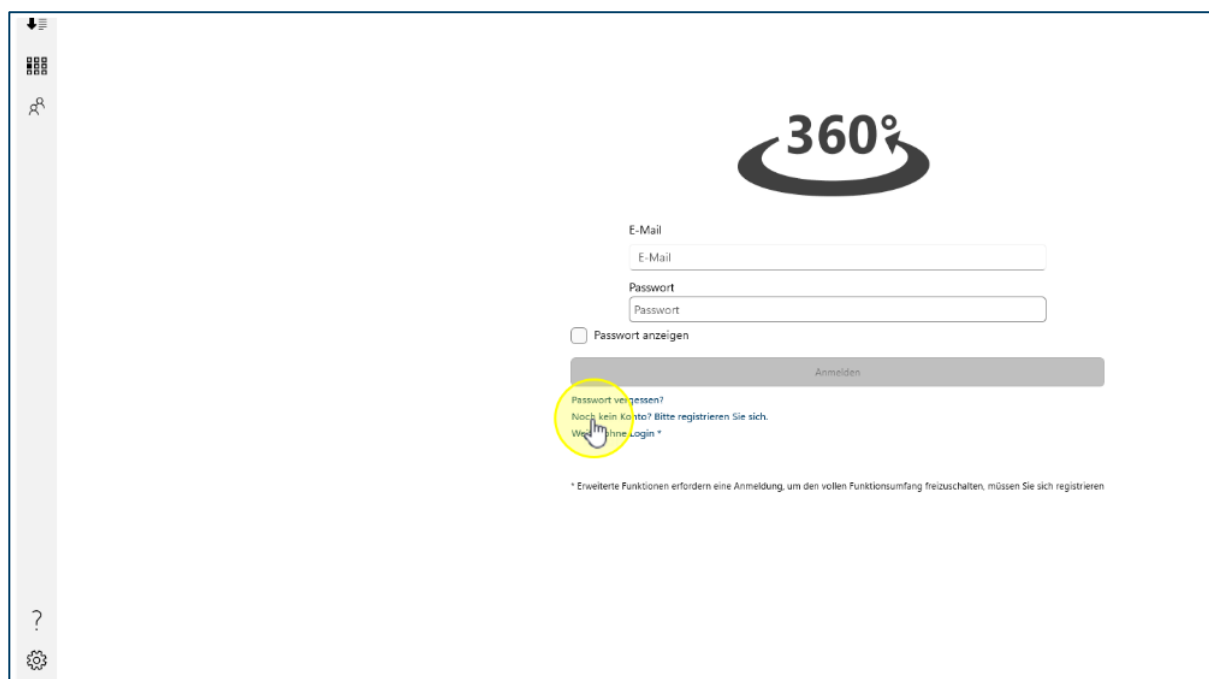

Starten Sie den ^{BD}Manager360°.
Klicken Sie „Noch kein Konto? Bitte registrieren Sie sich.“

Füllen Sie die Formularfelder aus

Vergeben Sie ein Passwort und merken Sie es sich gut!
Beachten Sie dabei die Anforderungen an das Passwort

Registrierung abzuschließen.

Titel

Titel

* Vorname

Hans

* Nachname

Muster

* Email

hans.muster@merz-dental.de

Neues Passwort

.....



Bestätigen Sie das neue Passwort

.....



Akzeptieren sie unseren [Endbenutzer-Lizenzvertrag \(EULA\)](#).

Registrierung abschließen

Akzeptieren Sie die EULA um die Registrierung abschließen zu können

Registrierung abzuschließen.

Titel

Titel

* Vorname

Hans

* Nachname

Muster

* Email

hans.muster@merz-dental.de

Neues Passwort

.....



Bestätigen Sie das neue Passwort


.....



☒ Akzeptieren sie unseren [Endbenutzer-Lizenzvertrag \(EULA\)](#).

Registrierung abschließen

Schließen Sie die Registrierung ab

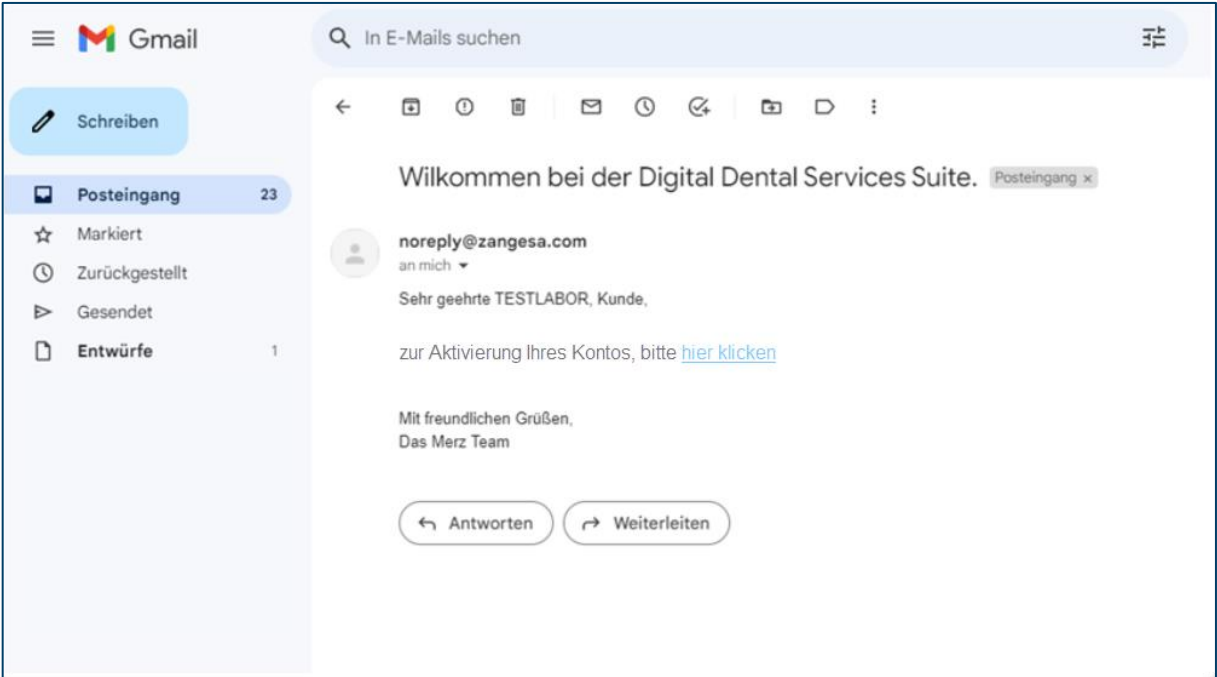

Bestätigen Sie die E-Mail die Ihnen an die angegebene E-Mail Adresse zur Verifizierung des Kontos zugesendet wurde



E-Mail

E-Mail

Passwort

Passwort

☐ Passwort anzeigen

Anmelden

Passwort vergessen?

Noch kein Konto? Bitte registrieren Sie sich.

Weiter ohne Login *

* Erweiterte Funktionen erfordern eine Anmeldung, um den vollen Funktionsumfang freizuschalten, müssen Sie sich registrieren

Geben Sie Ihre Account-Daten ein

E-Mail

Passwort

☐ Passwort anzeigen

Anmelden

Passwort vergessen?

Noch kein Konto? Bitte registrieren Sie sich.

Weiter ohne Login *

* Erweiterte Funktionen erfordern eine Anmeldung, um den vollen Funktionsumfang freizuschalten, müssen Sie sich registrieren


Klicken Sie auf „Anmelden“

Nachrichten


Update BD Manager360° Der BDManager360° kommt zum neuen Jahr mit einer Verbesserung im Austausch von Daten und Projekten daher. Der Button für die Downloadzentrale oben rec... Freitag 09 Januar	Update 4.125217.2 mit BD... Mit dem Update 4.125217.2 der BDCreator® PLUS Software, werden neue Geometrien für die Verwendung der BDLoad 98.5mm in die Software integriert. Diese... Mittwoch 06 August	Umstellung auf 98.5mm Es ist so weit! wir möchten Sie über eine wichtige Neuerung in unserem Digital Denture Sortiment informieren. Der bewährte BDLoad® Fräshöhling wird ab... Donnerstag 24 Juli	Gingiva Templates BDCreator® PLUS Version 4.1.25080.2 Neuerung im Update des BDCreator® PLUS ab Version 4.1.25080.2 Gingiva Vorschläge Aus einer Auswahl von vorgefertig... Freitag 16 Mai	vereinfachte Modellanalys... Der BDCreatorPLUS bekommt vielen Neuerungen ab Version 4.0.24337.2. Die Version 4.0 löst die Generation 3.XX ab – da diese neue Version einige grundleg... Freitag 13 Dezember	Schnelle Hilfe Schneller Support mit QuickSupport von TeamViewer. Mit dem kostenfreien TeamViewer QuickSupport Modul kann unser Support unkompliziert Hilfestellung bi... Montag 09 Dezember	MEDIT Anbindung Verbinden Sie Ihren Account mit Ihrem bestehenden MeditLink Konto und rufen Sie Scan Daten direkt im Manager 360° auf! Öffnen Sie den Web Manager360°... Freitag 22 November	BDKEY Schablonen BDKEY mit abgeflachten Seitenzähnen zum herunterladen und ausdrucken BDKEY mit Seitenzähnen zum herunterladen und ausdrucken BDKEY_INNERPLANE zum Down... Dienstag 14 Mai	Die passenden Daten zu de... Klicken Sie auf die Abbildung um den Download Prozess zu starten. Dienstag 14 Mai	Kurzbeschreibung zu den N... Manager360° Kurzbeschreibung Montag 26 Februar
--	--	---	---	--	---	---	---	---	--

Der ^{BD}Manager360° startet mit den „Neuigkeiten“.


Klicken Sie auf „Einstellungen“ (unten links), um die Grundeinstellungen der Software anzupassen.

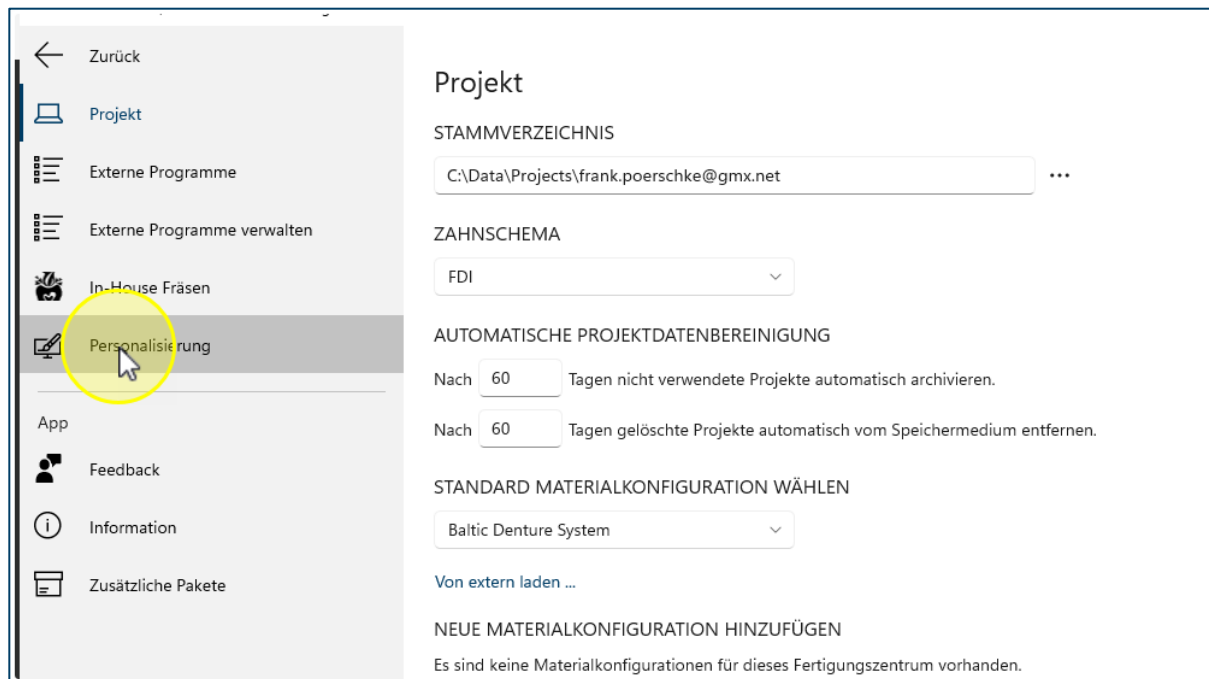


Klicken Sie auf „Personalisierung“

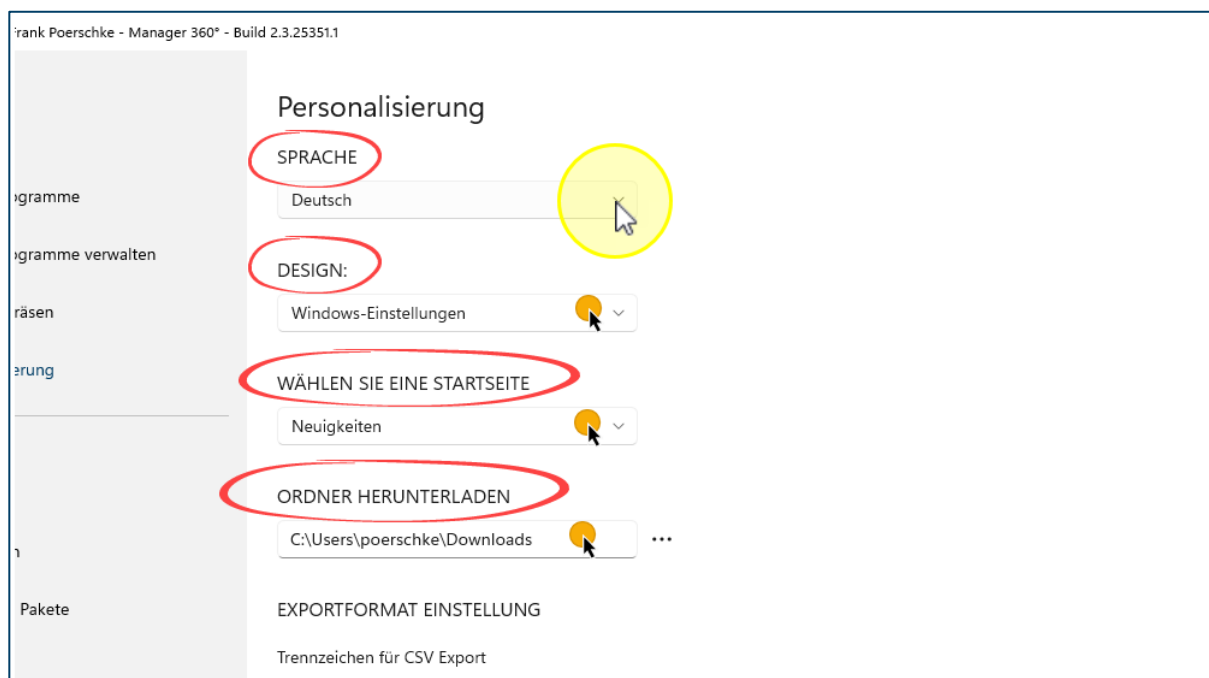


Sie können Sprache, Design, Startseite und den Projektordner auswählen

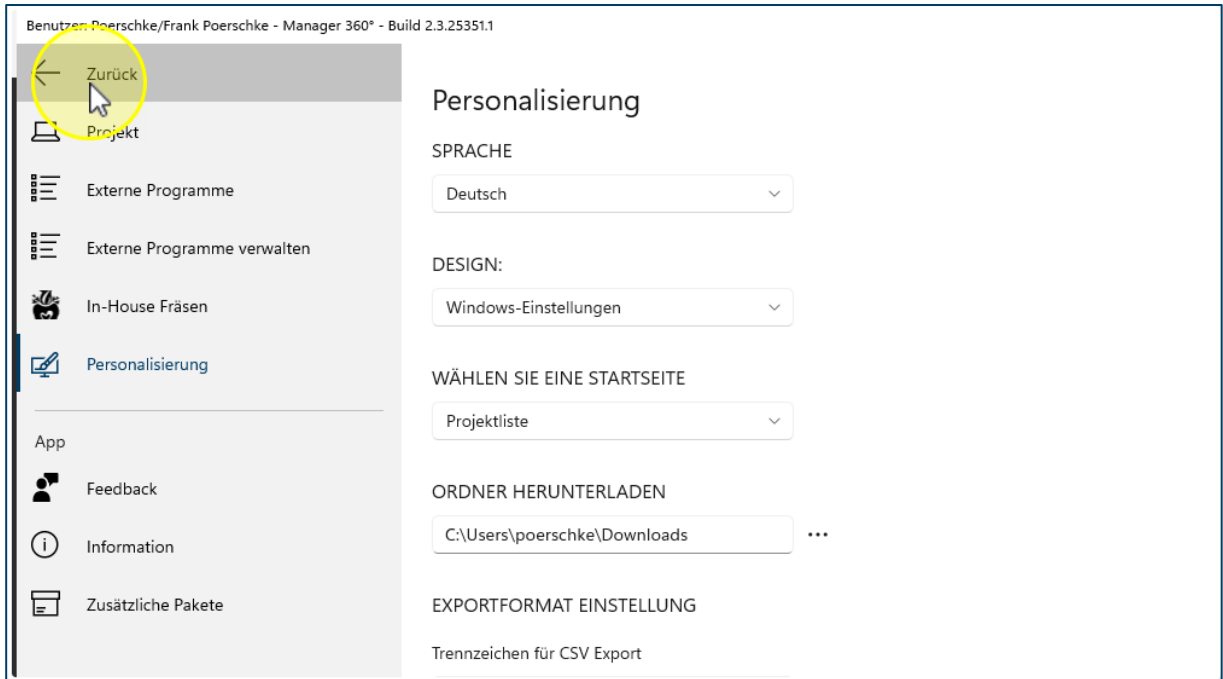

Mit der Schaltfläche „Zurück“ gelangt man wieder zum Startbildschirm

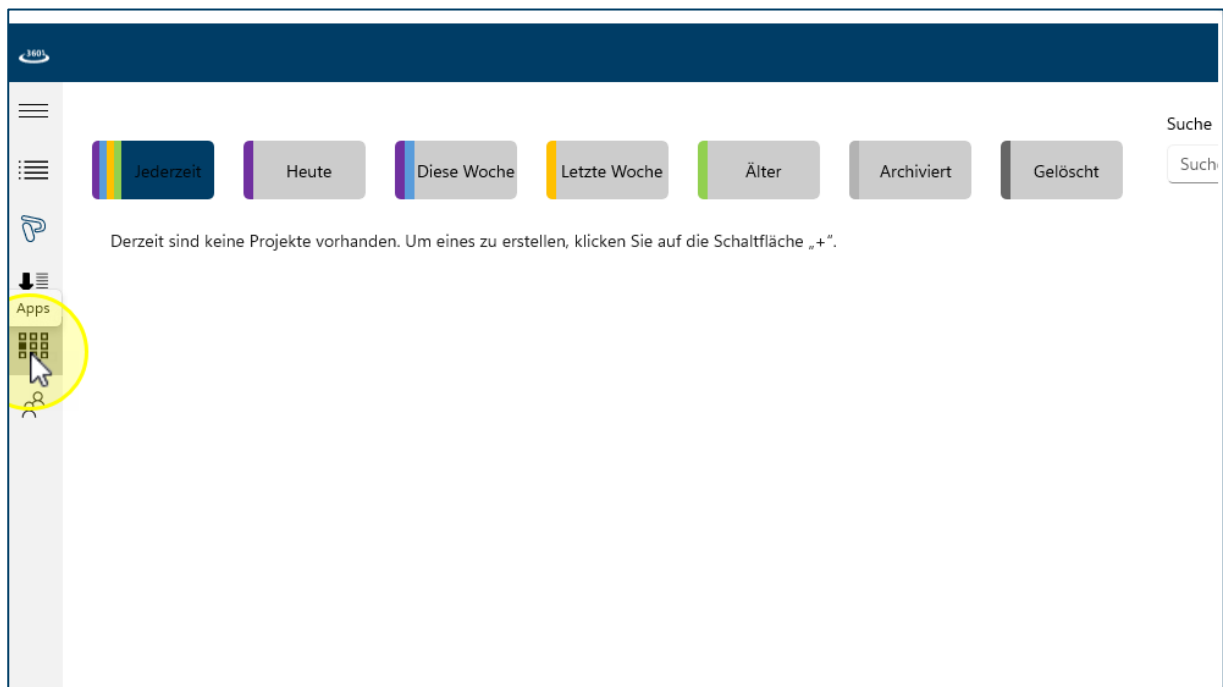

Zur Aktivierung der Module klicken Sie auf „Apps“

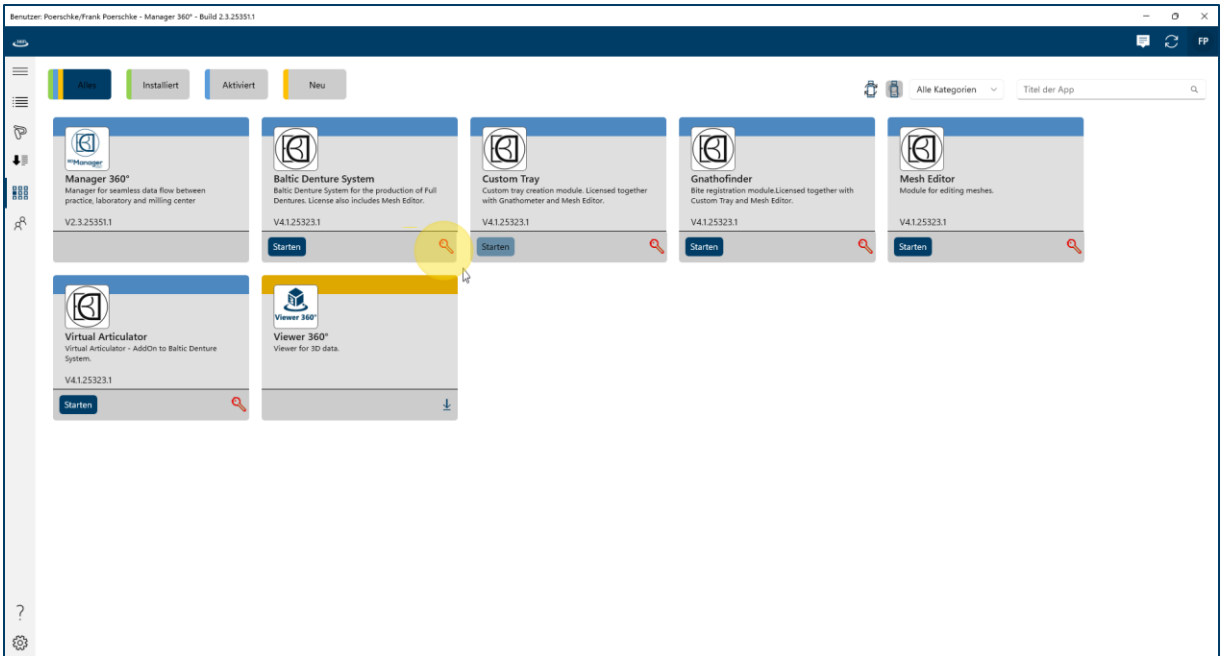

Die nicht aktiven Module sind mit einem roten Schlüsselsymbol markiert

Digital Denture - 100 % your way

Herzlichen Glückwunsch!


Starten Sie jetzt in Ihren digitalen Workflow und aktivieren Sie die **BDCreator® PLUS** CAD-Software mit Ihren persönlichen Lizenz-Keys:

BDCreator® PLUS CAD Lizenz Keys "Basic Lizenzmodell"	
Basic	BDS-8F6E-F720-A7A2-4096-A829-1621-7213-E79D
Virtueller Artikulator	FCT-85C9-35AE-68FC-4C90-AB54-D4EB-BEB6-96E2
Arbeitsvorbereitung/ Gnathometer	GNA-BAEE-78E0-96DF-4606-A33D-2801-AF79-868D
BDCreator® PLUS CAD Lizenz Key "Add-on"	
artegral® life PreSets	PMP-FAA9-6FDA-2AD3-48D5-817C-9085-C43E-C6F1

Die Lizenzschlüssel können beim Merz Dental Vertriebsinnendienst kostenpflichtig bestellt werden.

Die Codes werden in einem Lieferschein per E-Mail zugesendet.


Download - Installation - Anmeldung

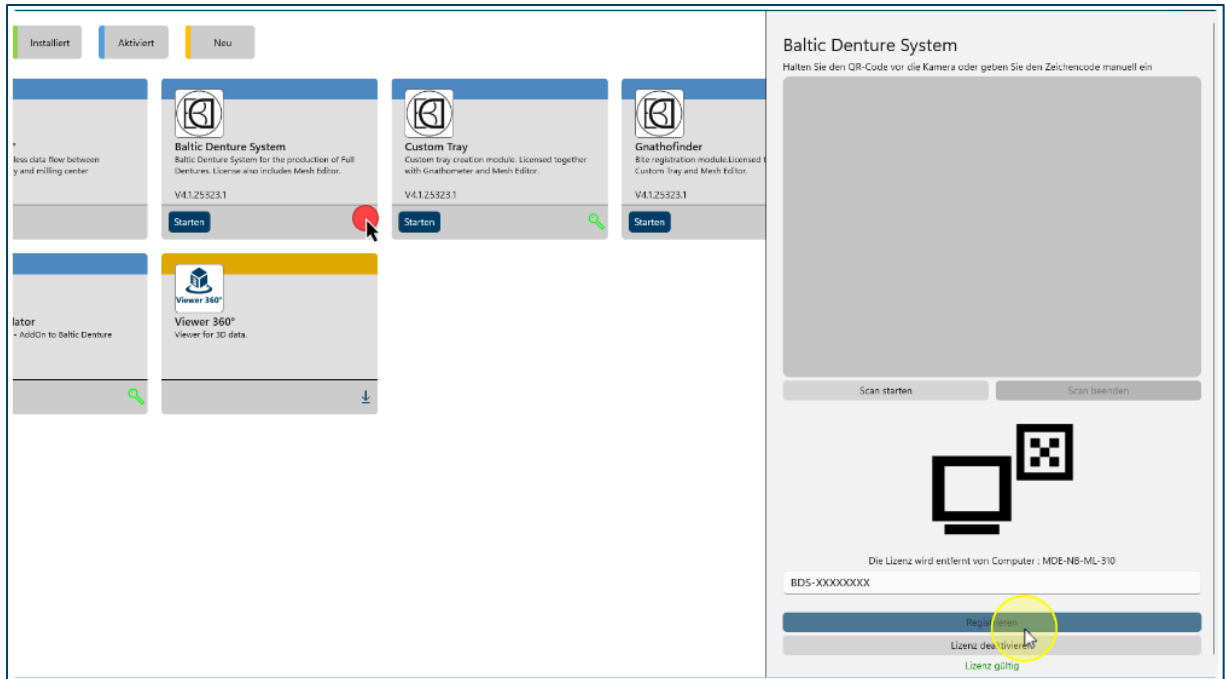

Fügen Sie die Lizenzschlüssel entsprechend ein:


Baltic-Denture-System	= BDS-xxxx-xxxx-...
Custom Tray und Gnathofinder	= GNA-xxxx-xxxx-...
Virtueller Artikulator	= GNA-xxxx-xxxx-...
artegral®life PreSets	= PMP-xxxx-xxxx-....

(ebenfalls im Feld für „Baltic Denture System“ aktivieren)

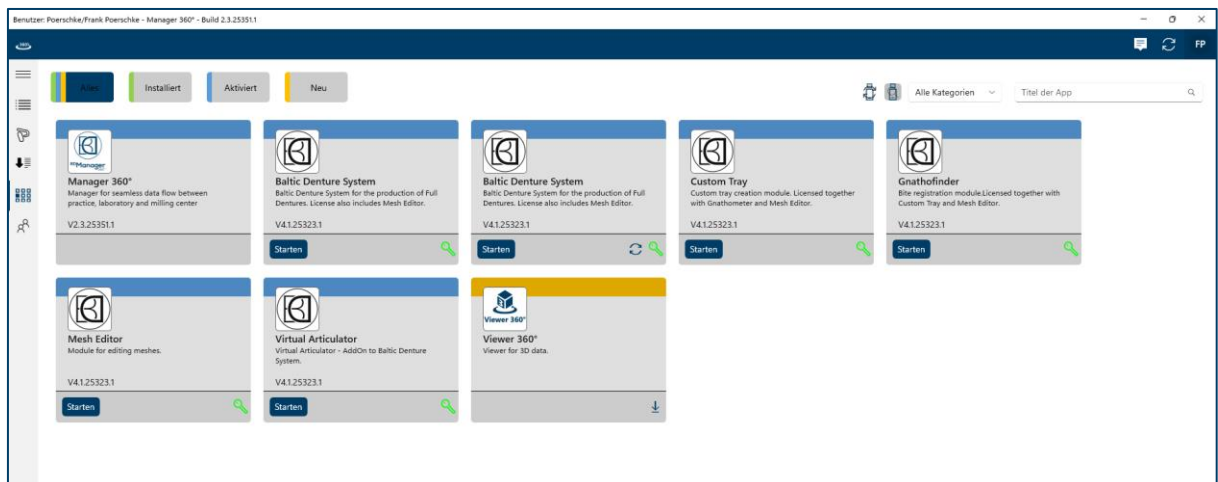


Bitte die Lizenzschlüssel stets gut aufheben!

Nach Eingabe der Lizenzschlüssel werden die entsprechenden Module freigeschaltet. Der Viewer 360° und der Mesh Editor benötigen keine Lizenzen und werden automatisch aktiviert.

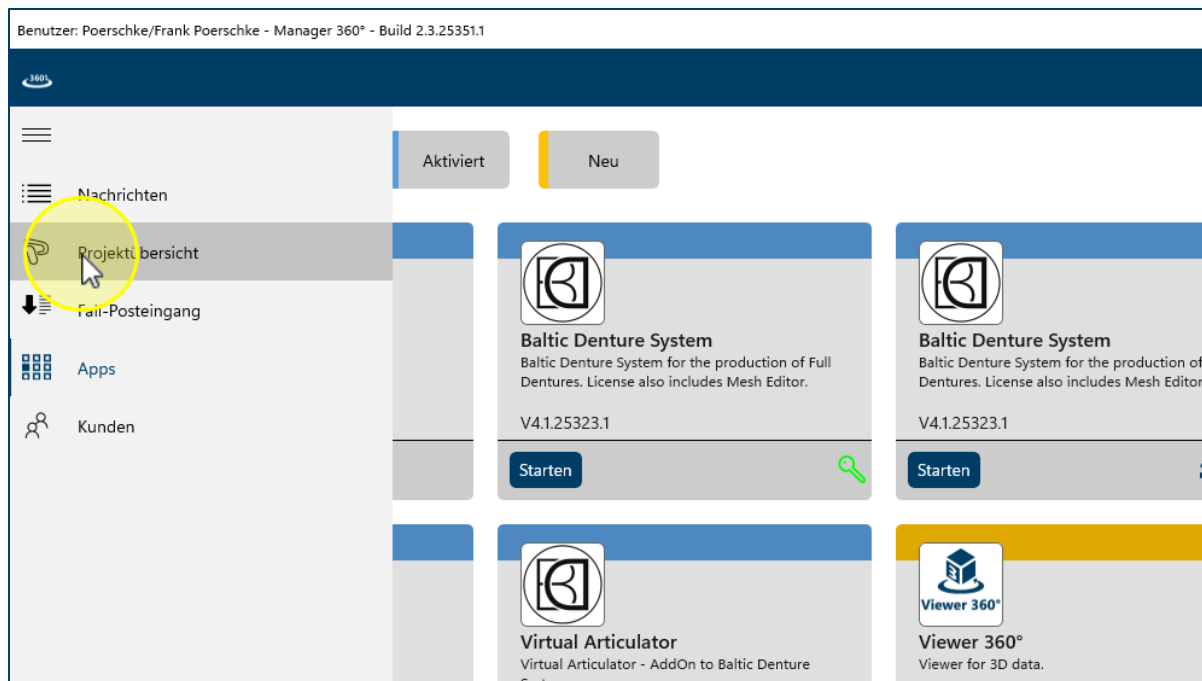


Zur Rückkehr zur Projektansicht klicken Sie die entsprechende Schaltfläche auf der linken Seite

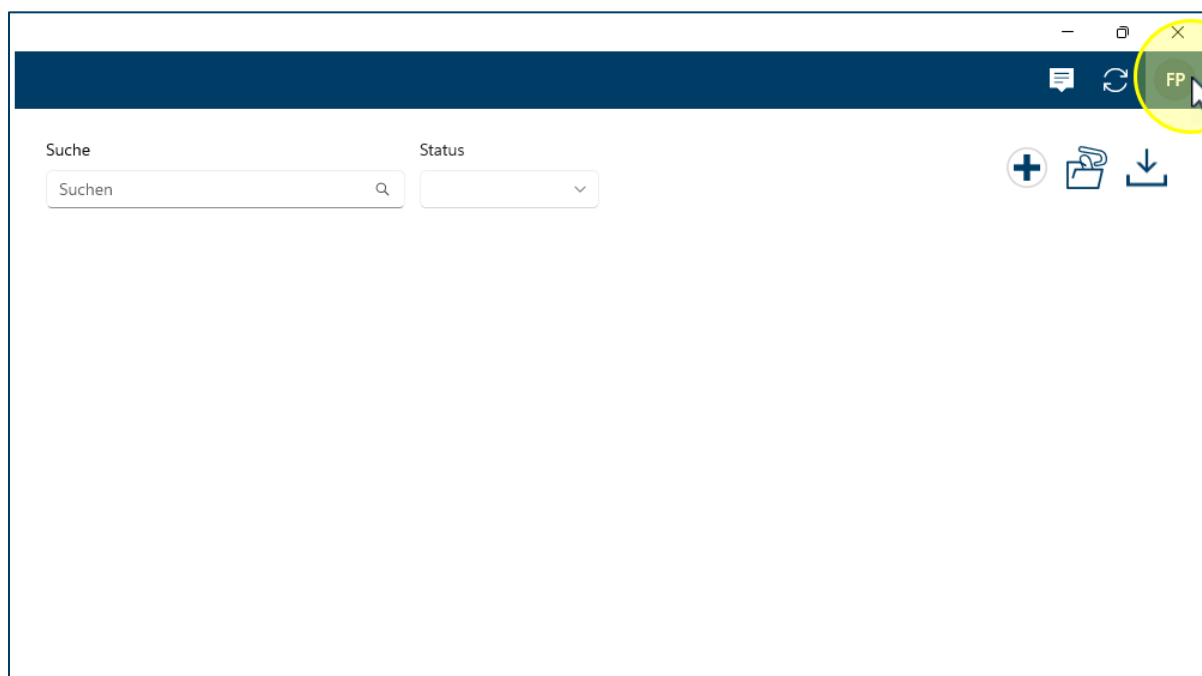


Erstellen eines Unternehmenskontos

Zur Einlösung von **Pay per use** Credits werden weitere Informationen benötigt, um im System als Unternehmen, mit Liefer- und Rechnungsadresse geführt zu werden

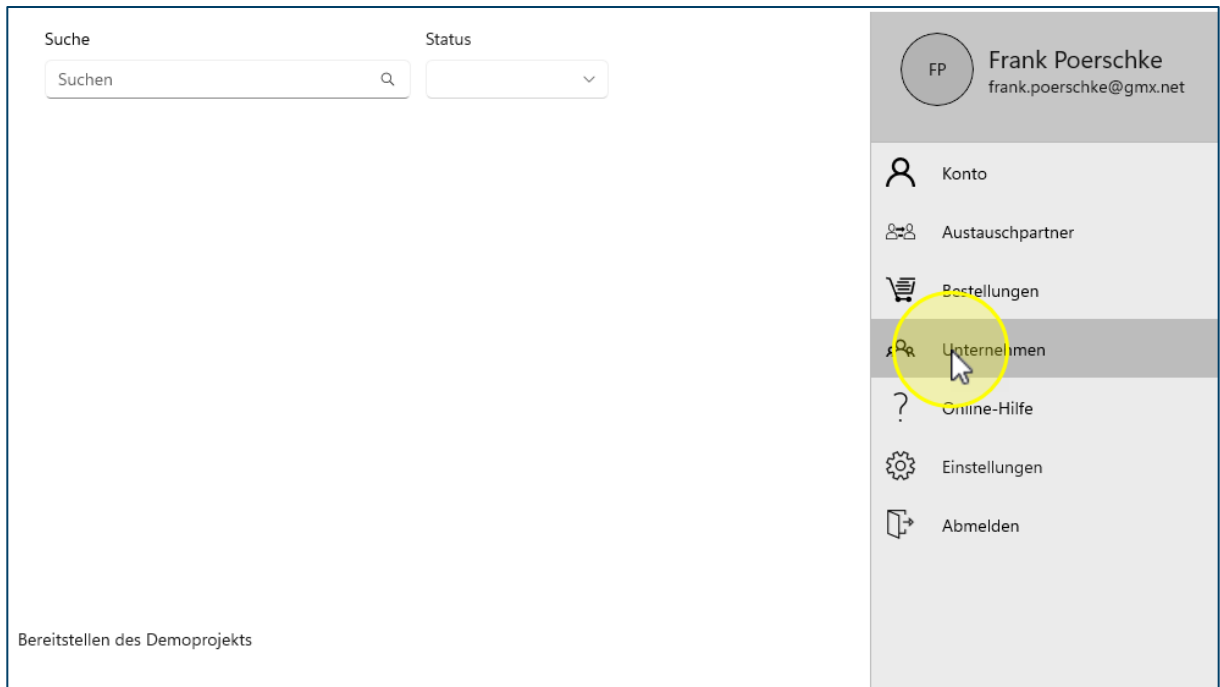

Klicken Sie auf „Unternehmen“

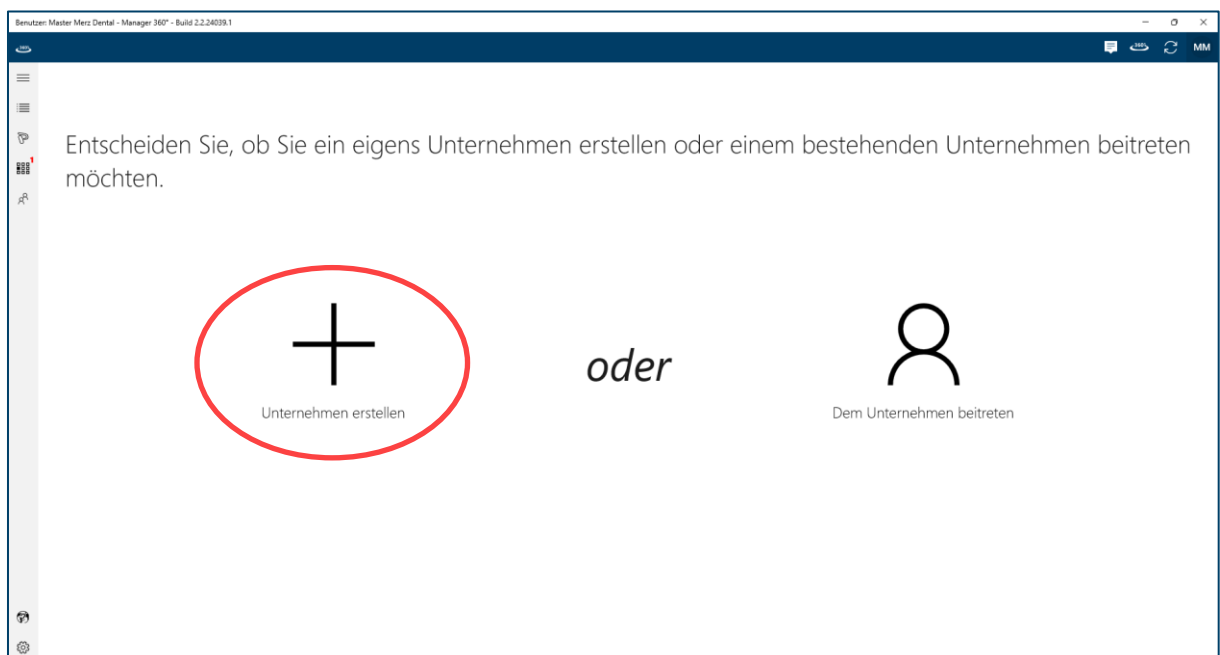

Wählen Sie „Unternehmen erstellen“

Unternehmen erstellen

Anzeigenname *

MDS Master

Systemkennung *

MDS.Master

Info

Testkunde

Webseite

Webseite

Adressen *

Firmenname *

Testkunde MDS Master

Straße *

Kieferweg 1

Postleitzahl *

24321

Stadt *

Lütjenburg

Land *

Germany

Telefon

Telefon

E-Mail

E-Mail

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

☒ Rechnungsadresse

☒ Lieferadresse

Unternehmen erstellen

Speichern Sie zunächst alle Angaben.

Die Daten können nachträglich noch überarbeitet werden.

Nach einem Klick auf „Unternehmen erstellen“ ist der Vorgang abgeschlossen.

Adressen *

Testkunde MDS Master

Kieferweg 1
24321 Lütjenburg
Germany




Alle mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder
Die Systemkennung wird automatisch vergeben.


Die Systemkennung kann vom Anzeigenname abweichen oder eine Abkürzung eines Anzeigenamens sein.

Die Systemkennung identifiziert das Unternehmen unabhängig vom Anzeigenamen.



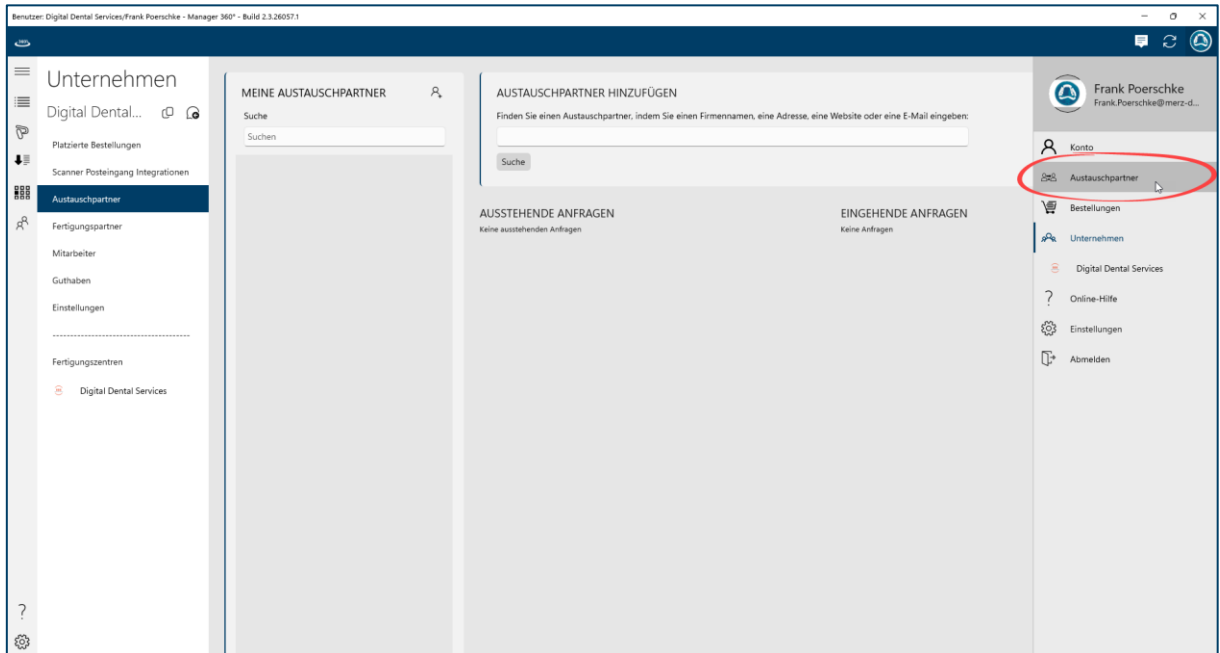


Um mit einem Fertigungszentrum in Kontakt treten zu können, wird eine entsprechende Anfrage benötigt.

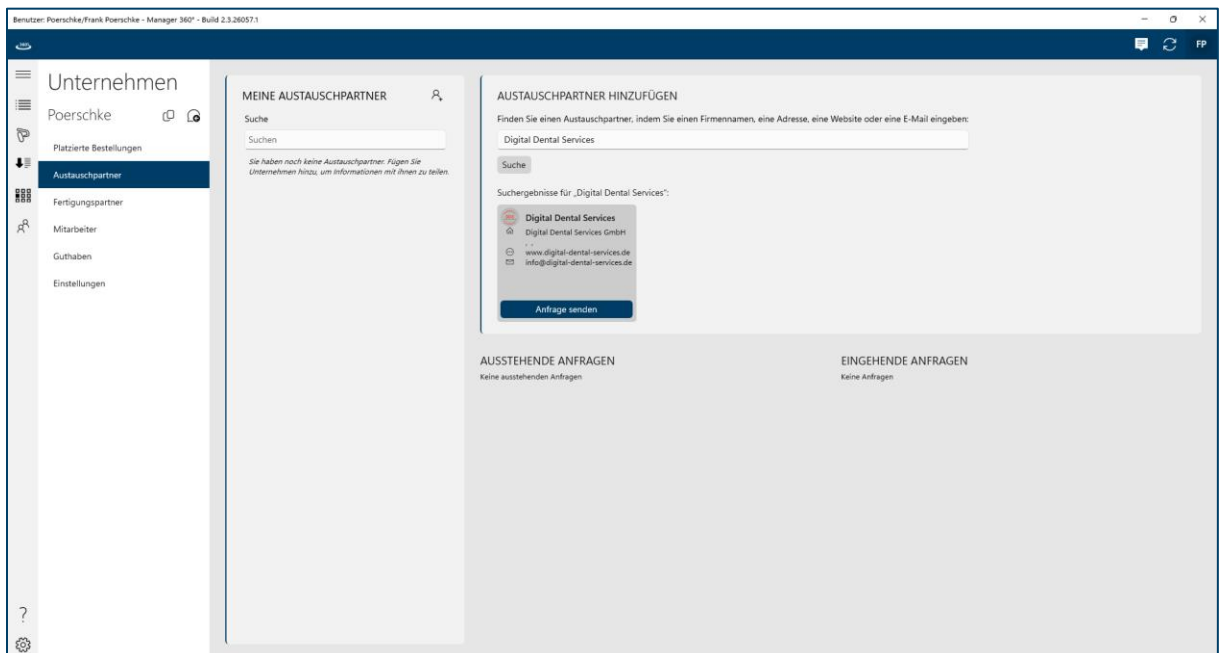


Geben Sie im Feld „AUSTAUSCHPARTNER HINZUFÜGEN“ den Namen „Digital Dental Services“ ein. Im Suchergebnis sollte eine entsprechende Kachel mit den Angaben des Fertigungs-zentrums erscheinen.

Klicken Sie auf „Anfrage Senden“.


Download - Installation - Anmeldung

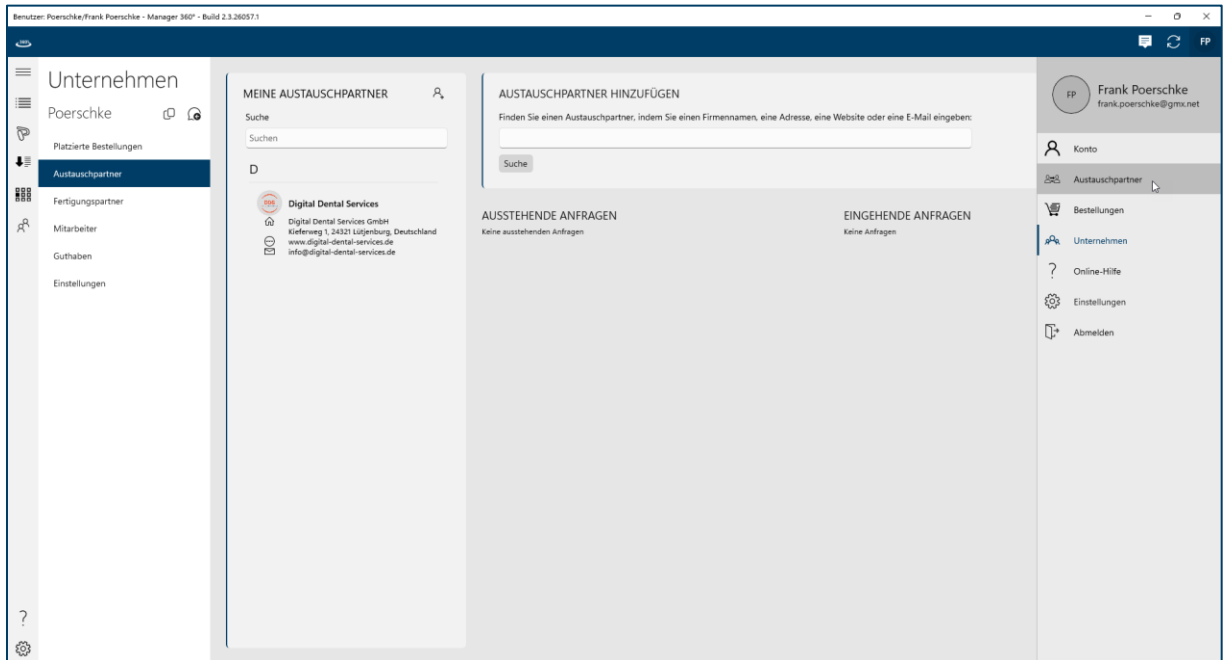


Nach Annahme der Anfrage durch das Fertigungszentrum, erscheint der Fertigungszentrums-Kontakt unter „MEINE AUSTAUSCHPARTNER“.

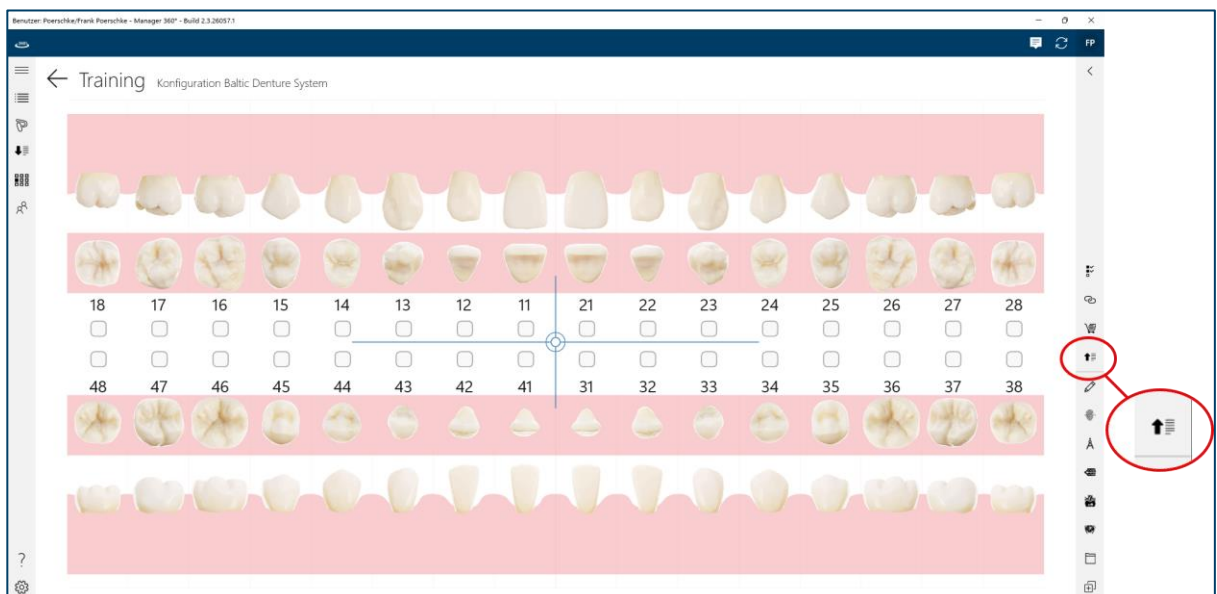


Durch die Einrichtung der Austausch-Partnerschaft ist es möglich, Projekte untereinander auszutauschen.

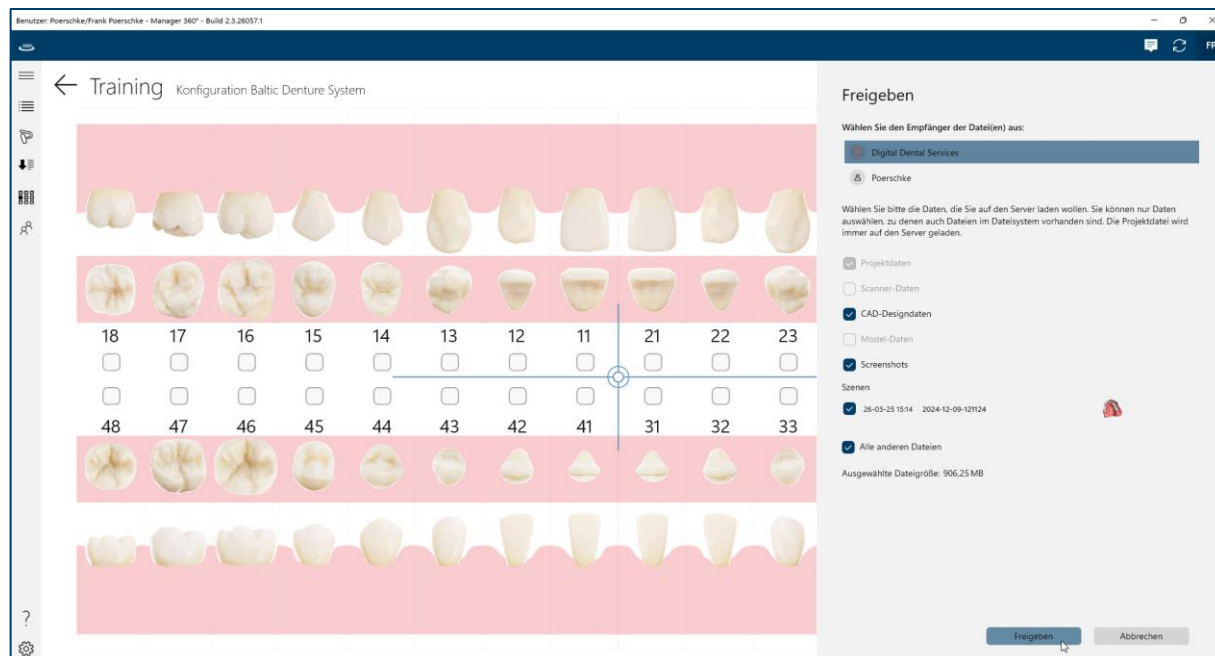


Zum Austausch eines Projektes, klicken Sie einfach auf die Projektkachel und wählen Sie im oberen Bereich auf der rechten Seite den Kontakt, mit dem Sie Ihr Projekt teilen möchten.

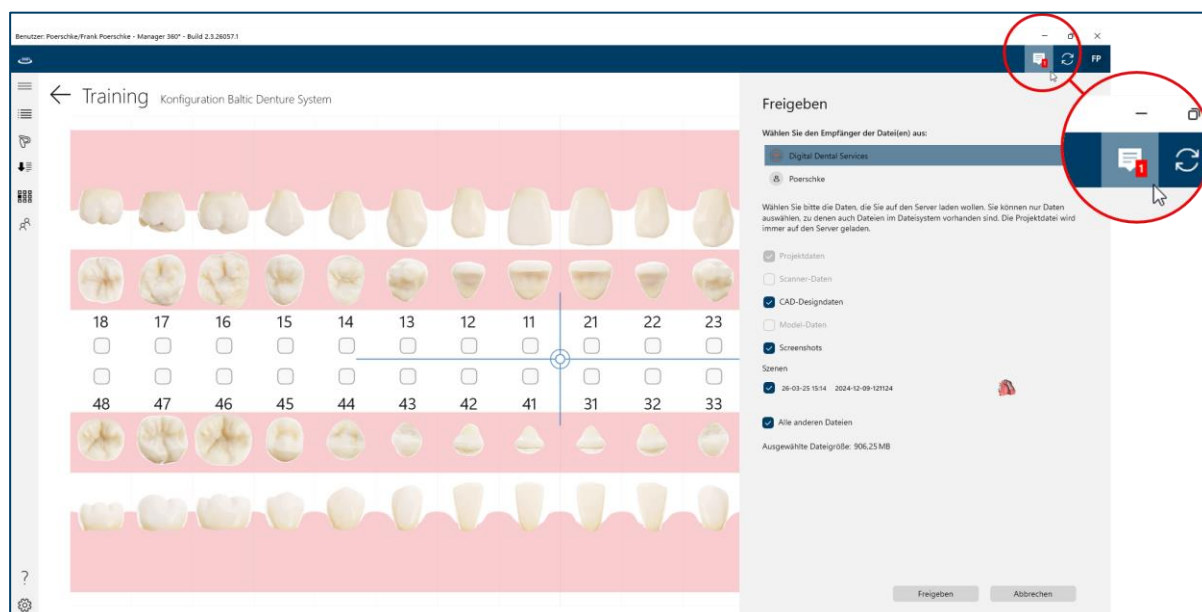


Nach einem Klick auf „Freigabe“, startet der Upload der Daten auf einen gesicherten Server. Eine Markierung oben rechts in der Arbeitsleiste, zeigt die Aktivität an.

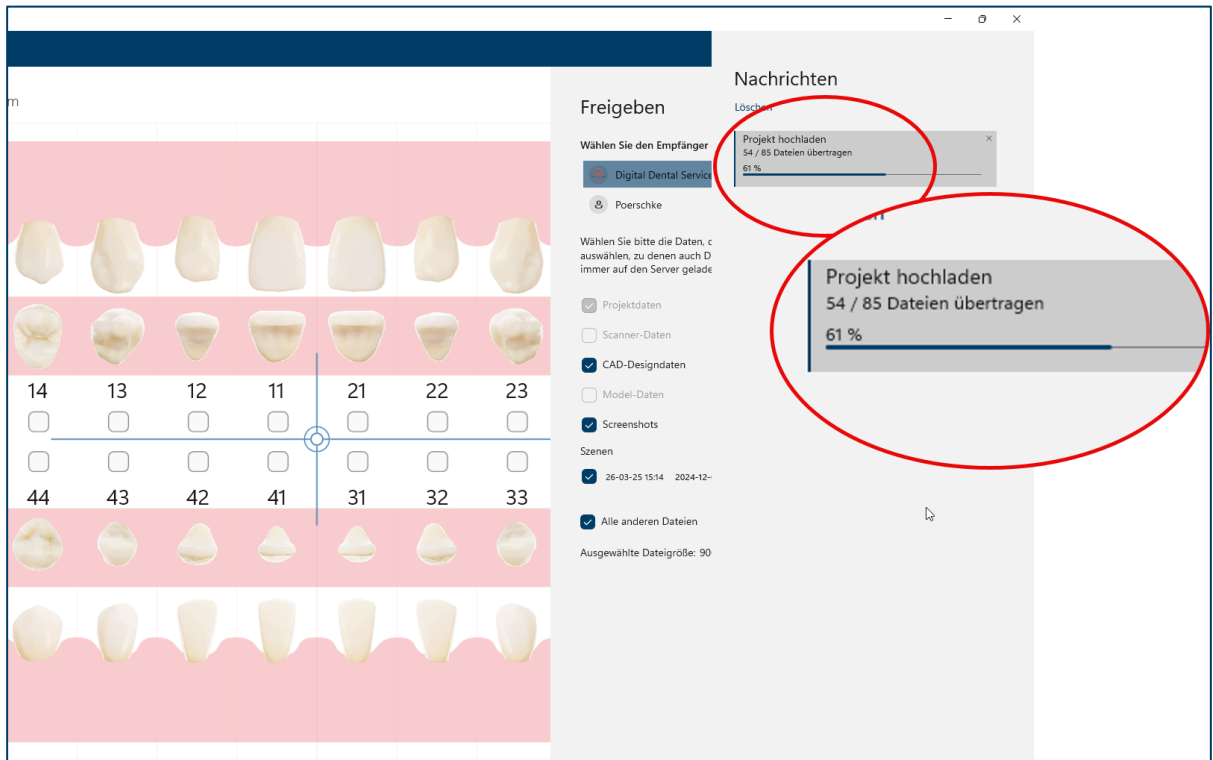

Ein Klick auf die entsprechende Schaltfläche zeigt den Fortschritt des Datenuploads an. Schließen Sie die Anwendung nicht, solange eine Aktivität angezeigt wird. Dies führt zur Unterbrechung des Datentransfers und zu Datenverlust.

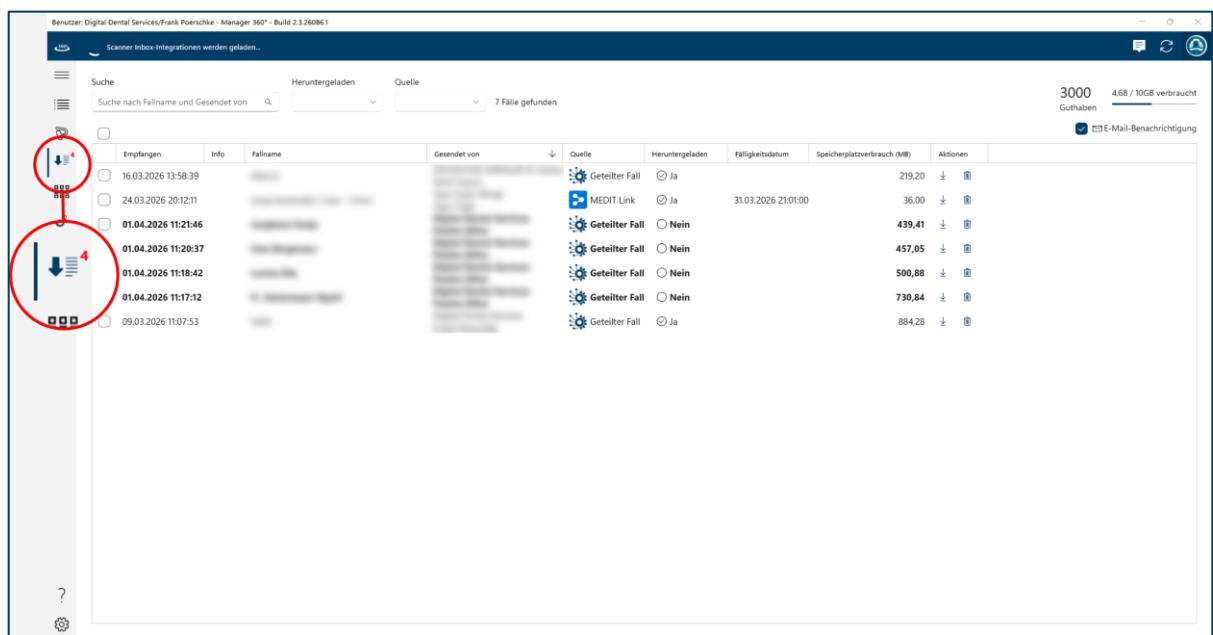

In der linken Arbeitsleiste finden sich die eingehenden Projekte in einer Auflistung. Mit einer roten Zahl wird die Anzahl der bereitstehenden Fälle angezeigt. Bitte beachten Sie, dass das Datenvolumen begrenzt ist. Nachdem der Download abgeschlossen ist, stehen die Projekte in der Übersicht zur Verfügung. Ein Projekt kann über das entsprechende Icon gelöscht werden.

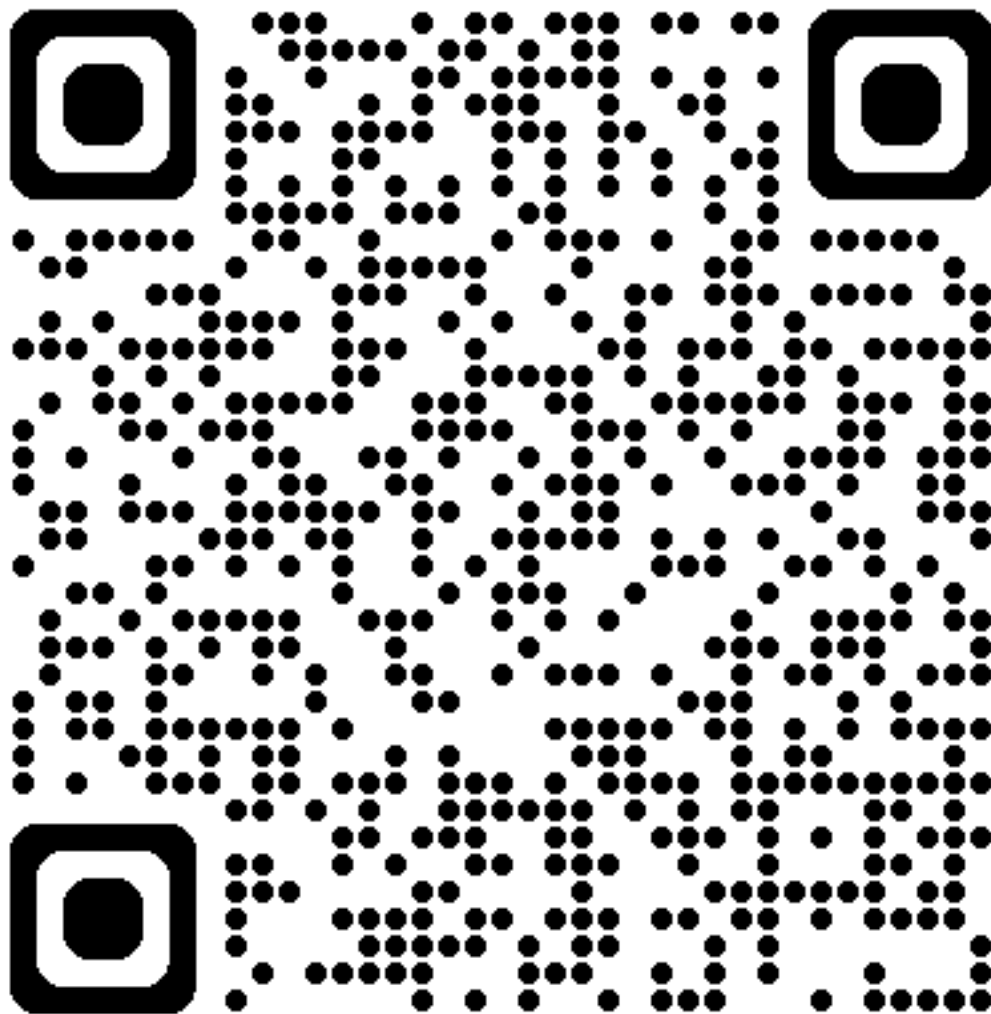

<https://crm.digital-denture-design.de/crm/tutorials.php>

Hier finden Sie weitere Informationen

- Fachberichte
- FAQ's
- Wissenswertes zum Baltic Denture System
- Tutorials zu technischen Fragen
- Schulungsvideos